

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150513

発行日 平成 27年 5月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100396
作業年月日	平成27年 5月 13日		作業時間:	Hr
デモ先	IHI播磨病院 様		TEL:	0791-22-0380
所在地	兵庫県相生市旭3-5-15		担当	様
	様		担当	様
納入年月日	保証期間 内 ☒ 外 ☐		付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H27年度 保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 686
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1515→0 更新(リセット) 実施・未実施	殺菌: 1554	殺菌+7L: 1686
	リークチェック: 49	自己洗浄: 527	7L単独: 106

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	排水フィルタ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	モニターポートホース		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中田 良二

印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者



作業者

