

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 5月 17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 100396
作業年月日	2017年 5月 17日		作業時間	: Hr
顧客名	IHI播磨病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県相生市旭3丁目5番15号		電話番号	: 0791-22-0380
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 5月 26日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 451
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204 / 102.B
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 1659 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 1561 回	消毒+アル: 4791 回
	リークチェック: 56 回	自己洗浄: 1022 回	アルコール単独: 106 回	エア単独: 4 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 140/1652 → NO. 12121247
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130618-022 → NO. 140527-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山