

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号

No. 200915

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 殿	機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	河村病院 様	機番	500360
環営	所在地	岐阜県岐阜市芥見大般若 1-84	納入日	2019年09月11日
環品	点検者	新鋭工業 (株) 本田純一 (株) IHI アグリテック 中澤一裕	受付日	2020年07月30日
			出荷日	2020年09月14日
計	3			

運転履歴

修理返却直後から「オゾンセンサ故障(E:100)」が頻発する

不具合原因 (故障箇所) と処置

この度は不具合を発生させてしまい、大変申し訳ありませんでした。

[1] 点検結果

オゾンセンサが運転中に出す信号が不安定で、これが原因で異常が発生しました。
オゾンセンサを交換し、併せて定期保守点検を実施して復旧いたしました。

写真1 : 交換部品一式



[2] 作業内容

- 1 : 部品交換・・・下表をご参照ください
- 2 : オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.70 ppm・・・正常
- 3 : 運転確認・・・正常
- 4 : 装置情報

運転プログラム Ver0304/T12A

交換後運転回数 : 136→0 消毒 : 25/25、消毒+アルコール : 112/112、リークチェック : 132
自己洗浄 : 61、アルコール単独 : 0、エア単独 : 0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	オゾンセンサ	1	
2	定期交換部品	1式	

(株) IHI アグリテック (旧社名 : IHI シバウラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

承認

松
'20.09.15
永

責任技術者

中
'20.09.15
澤

作成

R02.9.15

中澤