

点検・修理報告書

管理 No. 210641

発行日: 2021 年 10 月 8 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2021 年 9 月 29 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	すずき歯科医院	様	TEL: 048-999-7766
所在地	埼玉県八潮市緑町1-7-10		ご担当 様
販売店	ササキ(株)		ご担当 様
納入年月日	2014 年 5 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100046	運転回数:	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー8 循環水圧低下			
・エラー16 槽内温度低下			
・ドアが開きっぱなしになる			
原因			
・循環ポンプの劣化			
・温度を測定するセンサーの接触不良			
・ドアワイヤーが切れている			
処置、作業内容			
・循環ポンプ、配管ゴムC交換			
・SSR（無接点リレー）交換			
・ドアワイヤー周辺部品交換			
・各種点検、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・循環ポンプ		1		
2	・SSR		2		
3	・配管ゴムC		1		
4	・ドアワイヤー周辺部品		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 20 日

ご署名 鈴木 不心子 印

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者