

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	けんもつ歯科クリニック	製造番号	14060076	点検実施日	2015/8/19	ご承認印	
	住所	東京都国分寺市光町1-45-11	運転時間	252分	点検実施者	ムロヤキス 榎谷		
	納入場所		サービス	定期・保守・フルメンテ	モリタ担当部署	高木様		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作・グリスアップ
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
(合格)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
排水ポンプ	2
循環ポンプ	1

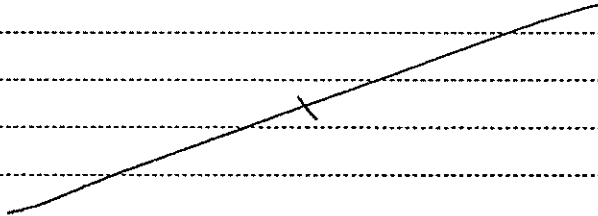


株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

御施設名		依頼日時		年 月 日 時 分	
けんもつ歯科クリニック様		作業開始日時		2015年 8月 19日 9時 00分	
部 署		作業終了日時		2015年 8月 19日 12時 00分	
所 属		作 業 時 間		3 時間 00分	
メーカー名	(株)モリタ / (株)IHIシボラ	作業区分	1. 保証内 2. 保証外 3. 保契中 4. 他		
品 名	ウォッシャー・ディスインフェクター	ディーラー名			
機 種	WD-150	作業者名	(株)ムウテクス 郷間、板谷		
シリアルNo.	14060076				
依頼内容 / 訪問目的		処置内容			
・定期点検。		・下記部品交換実施。 ・各部分解清掃。 ・各種設定確認。 ・循環水压低下エラー対策実施。 ・給水量および薬剤投入量の確認。 ・各動作テスト。 ・試運転。 ・各メンテナンスタイマーリセット。			
原因 /					
					
	部品コード	品 名	数 量	単 価	小 計
1		循環ポンプ	1		
2		薬剤ポンプ用チューブ	2		
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有 償 2. 無 償			部 品 料 計		
特記			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計 ※		
お客様 確認署名			監印 真		

A

※合計金額に消費税は含まれておりません。

責任技術者