

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	けんもつ歯科クリニック	製造番号	14060076	点検実施日	2018年8月3日	ご承認印	監印
	住所	東京都国分寺市光町1-45-11	運転時間	530	点検実施者	(株)ムトウテクノス 板谷		
	納入場所		サービス形態	定期保守・フルメンテ	モリタ担当部署	飯島 様		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合格

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1
原パッキン L=1500	1
原パッキン L=500	1
DPIチューブASSY	2
循環ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	けんもつ歯科クリニック 様	製造番号	14060088	点検実施日	2018年8月3日	ご承認印	監印 印 付
	住所	東京都国分寺市光町1-45-11	運転時間	1148 回	点検実施者	(株)ムトウテクノス 板谷		
	納入場所		サービス形態	定期保守・フルメンテ	モリタ担当部署	飯島 様		

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認☒ フック取付け状態・動作確認☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ☒ フック検出ユニット作動確認☒ ドアロックユニット作動確認☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無☒ 減菌温度センサの汚れ☒ 網カゴの破損・汚れ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ 給気弁の作動状態・漏れ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)☒ ストレーナーの汚れ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損☒ 安全弁(減菌室)の漏れ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ フランジパッキン漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認☒ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ☒ 下部給水弁の漏れ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認☒ 電源スイッチの作動状態☒ 行程表示LEDの点灯☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ☒ 各基板のコネクター緩み確認☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒ 本体の水平確認・基準傾き内☒ アジャスタフットの緩み・設置状態☒ キズ・汚れ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムの確認☒ 入力・出力確認☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

☒ B&Dテスト実施☒ ケミカルインジケータによる判定☒ リークチェック☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

BMS-Test

STEAM

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030