

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

IHIシバウラ用

お 客 様	名称 <u>けいもつ歯科クリニック</u> 住所 <u>京都府国分寺市光町1-45-11-1F</u> 納入場所	製造番号 <u>14060076</u> 運転時間 <u>156</u> 時間 サービス形態 <u>定期・保守・フルメンテ</u>	点検実施日 <u>2020年12月17日</u> 点検実施者 <u>金子一紀</u> モリタ担当部署	ご承認印 <u>7Lc-1</u>
-------------	--	--	--	----------------------

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛け・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- レインターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの壊れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態盛・漏れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
 - アジャスタットの緩み・設置状態
 - キズ・汚れ
 - 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
 - エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
 - 洗剤ポンプチュウブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
DP142-7" Assy	1
扇バランキン(下部) L=500	1
" " " L=1500	1
人口フィルター	1
HEPAフィルター	1
※ DP142-7" Assy は 12月上旬工事で済	



機械事業本部営業部 営業二課
〒704-8122 岡山県岡山市東区西太寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030