

メーカー用



株式会社HILWA

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨大寺前2-70番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

## クラスB オートクレープ BC-17 設置報告書

|     |                 |            |     |  |
|-----|-----------------|------------|-----|--|
| お客様 | 名称              | 製造番号       | ご確認 |  |
|     | 住所              | 納入検査実施日    |     |  |
|     | 納入場所            | 納入検査実施者    |     |  |
|     | 秋本歯科診療所         | 13080011   |     |  |
|     | 神奈川県横浜市南区南仲町1-6 | 2018/12/12 |     |  |
|     |                 | 秋本歯科診療所 担当 |     |  |

| 項目                           | 判定 | 検査項目                  | 項目    | 判定 | 検査項目               |
|------------------------------|----|-----------------------|-------|----|--------------------|
| ドア                           | OK | フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認 | 電装系   | OK | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  |
|                              | OK | フック検出ユニット作動確認         |       | OK | ディスプレイの色あせ・表示確認    |
|                              | OK | ドアロックユニット作動確認         |       | OK | 電源スイッチの作動状態        |
|                              | OK | 蓋板のキズ・汚れ              |       | OK | USBソケットの反応・汚れ      |
| 缶体                           | OK | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無        | 外装・設置 | OK | 行程表示LEDの点灯         |
|                              | OK | 滅菌温度センサの汚れ            |       | OK | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
|                              | OK | 網カゴ、破損汚れ              |       | OK | 本体の水平確認・基準傾き内      |
|                              | OK | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ        |       | OK | アジャスタフットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク                        | OK | 給水タンクの損傷・漏れ           | 制御    | OK | キズ・汚れ              |
|                              | OK | 下部給水弁の漏れ              |       | OK | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷  |
|                              | OK | 蓋・取っ手の損傷・割れ           |       | OK | 運転プログラムの確認         |
|                              | OK | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | OK | 入力・出力確認            |
| 排水タンク                        | OK | タンクの汚れ・漏れ             | 性能評価  | OK | B&Dテスト実施           |
|                              | OK | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | OK | リークチェックテスト         |
| <div>異常なし</div> <div>✓</div> |    |                       | その他   | OK | 付属品の確認             |
|                              |    |                       |       | —  | 運転説明 (3日実施)        |
|                              |    |                       |       | OK | 装置内運転時異音           |

| 備考 |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

# ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木大字西170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

|     |      |                 |             |            |     |  |
|-----|------|-----------------|-------------|------------|-----|--|
| お客様 | 名称   | 秋本歯科診療所         | 製造番号        | 13080007   | ご確認 |  |
|     | 住所   | 神奈川県横浜市南区南仲通1-6 | 納入検査実施日     | 2013/12/12 |     |  |
|     | 納入場所 |                 | 納入検査・会社・実施者 | (株)ムラサキスズメ |     |  |

## 項目

| 項目    | 判定 | 検査項目                | 項目    | 判定 | 検査項目                |
|-------|----|---------------------|-------|----|---------------------|
| ドア    | OK | 開閉動作確認              | 外装・設置 | OK | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | OK | ドアパッキンキズ・汚れ点検       |       | OK | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | OK | ドアロックユニット作動確認       |       | OK | キズ・汚れ               |
|       | OK | ドア緊急時開放スイッチ機構確認     |       | OK | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | OK | ドア開放スイッチON時の開放状態    | 制御    | OK | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | OK | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付     | 性能評価  | OK | 入力・出力確認             |
|       | OK | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ |       | OK | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | OK | 洗剤投入量の確認            |       |    |                     |
|       | OK | ローラーポンプの動作確認        |       |    |                     |
| 給排水   | OK | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ    | その他   | OK | 付属品の確認              |
|       | OK | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ    |       | —  | 運転説明 (5分実施)         |
|       |    |                     |       | OK | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | OK | 電源スイッチの作動状態         |       |    |                     |
|       | OK | SDソケットの反応・汚れ        |       |    |                     |
|       | OK | 行程表示LEDの点灯          |       |    |                     |
|       | OK | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  |       |    |                     |

## 備考

- 温水時間調整実施 75sec → 100sec (実際 140sec)
- 給水量調整実施 170dl → 110dl