

クラスBオートクレーブ BC-17 現地調査確認書兼発注書

配布先 (株)IHIシバウラ

FAX (086) 942-9030 作成日 25年 11月 20日

設置希望日時		25年 12月12日 (月) 時間 13:00 ~		納品説明 ☒ 当日 ☐ 別途			
客先	秋本歯科診療所 担当者	住所 神奈川県横浜市中区南仲町1-6					
		TEL - 未定 - FAX - -					
モリタ社	横浜支店 担当者 遠藤	住所 神奈川県横浜市中区新横浜2-3-8 KDX新横浜ビル9F					
		TEL 045 - 473 - 8471 FAX 045 - 473 - 8488					
代理店	ササキ横浜支店 担当者 安本様	住所 神奈川県横浜市中区扇町3-8-8					
		TEL 045 - 641 - 7197 FAX 045 - 641 - 1751					
機種名	クラスBオートクレーブ WD-150	台数	1台	☒ 通常仕様 ☐ プリンター仕様 ☐ RO水仕様			
オプション	品名 個数		品名 個数		品名 個数		
	☐ アルミトレー		☐ コンパクトPCD(イエロー)		☐ クラス4 ケミカルインジケータ		
	☐ トレースタンド		☐ コンパクトPCD(オレンジ)		☐ インキュベータ		
	☐ トレーホルダー		☐ コンパクトPCD(ライトブルー)		☐ バイオインジケータ		
	☐ バクテリアフィルター		☐ コンパクトPCD(パープル)		☐ プリンター		
	☐ 排水用チューブ 3m (アダプタ付)		☐ インジケータ (250枚 イエロー、オレンジ)		☐ プリンター用印刷用紙		
	☐		☐ インジケータ (250枚 パープル、ライトブルー)		☐ インクリボンカートリッジ		
建屋情報	建屋	☐ 新設 (完成予定 年 月 日)		☒ 即存建屋	設置階 1 F		
	駐車スペース有無	無し	エレベータ有無	無し	台車搬入可否	不可	
	搬入通路最小寸法	幅 m × 高さ m			段差の有無		
	設置スペース	☐ 原寸型紙記載の装置設置スペースが確保されていること。 ☐ 機器放熱を逃がすための処置がされていること。 ※原寸型紙参照					
	ユーティリティ ※原寸型紙参照	電気工事	単相AC200V 15A以上 単独漏電遮断器 コンセント形状 パナソニックWF3012EK同等品 (原寸型紙記載)				
		給水種	☐ 純水 ☐ 蒸留水				
排水工事		☐ バケツ排水 ☐ シンクへの引き回し排水					

注記

- 1. 設置場所の図面、写真等を添付のこと。
- 2. ユーティリティが原寸型紙と異なる場合は、詳細を添付のこと。
- 3. その他特記事項がある場合は、以下に記載のこと。

特記事項

--

メーカー用



株式会社ヒシナワ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨谷町2-70番6

TEL086-944-16528

FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17 設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	
	住所	納入検査実施日		
	納入場所	納入検査実施者		
	秋本歯科診療所	13080011		
	神奈川県横浜市南区南町1-6	2018/12/12		
		(株)ヒシナワ 環境サービス部		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	OK	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	OK	フック検出ユニット作動確認		OK	ディスプレイの色あせ・表示確認
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	電源スイッチの作動状態
	OK	蓋板のキズ・汚れ		OK	USBソケットの反応・汚れ
缶体	OK	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	OK	行程表示LEDの点灯
	OK	滅菌温度センサの汚れ		OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	OK	網カゴ、破損汚れ		OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	OK	給水タンクの損傷・漏れ	制御	OK	キズ・汚れ
	OK	下部給水弁の漏れ		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	蓋・取っ手の損傷・割れ		OK	運転プログラムの確認
	OK	フロートスイッチの作動状態・汚れ		OK	入力・出力確認
排水タンク	OK	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	OK	B&Dテスト実施
	OK	フロートスイッチの作動状態・汚れ		OK	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	OK	付属品の確認
				—	運転説明 (3日実施)
				OK	装置内運転時異音

備考			