

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用

 株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境安全課 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木寺町北170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	秋本歯科診療所	製造番号	13080009	ご確認	
	住所	神奈川県横浜市中区南仲通1-6	納入検査実施日	2013/12/12		
	納入場所		納入検査・会社・実施者	(株)△△△△△△△△		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ
	OK	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	ドア開放スイッチON時の開放状態		OK	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	OK	入力・出力確認
	OK	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	OK	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	OK	洗剤投入量の確認			
	OK	ローラーポンプの動作確認			
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	OK	付属品の確認
	OK	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		—	運転説明 (5分実施)
電装系	OK	電源スイッチの作動状態		OK	装置内運転時異音・振動
	OK	SDソケットの反応・汚れ			
	OK	行程表示LEDの点灯			
	OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

- 洗浄時間調整実施 75sec → 120sec (実測 140sec)
- 給水量調整実施 100dl → 110dl