

お客様用

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

株式会社IHIシリバウラ

環境事業部 環境サービス G E N E R A L
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9630

お客様	名称	中川歯科クリニック	製造番号	13090013	ご確認			
	住所	瀬戸内市東山3-10-9-3F						
	納入場所	納入検査・会社・実施者 マツドアレス 3010室						

項目

項目	合否 判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認 ・通常のタッチパネル開放操作が可能であること ・閉める時にスムーズに閉めることができること	外装・設置	✓	本体の水平確認 ・水準器により装置設置条件の水平を取ること
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ確認 ・目視でパッキンキズ、歪み、汚れがないこと ・運転時ドア付近から水漏れがないこと		✓	アジャスタット設置状態 ・装置前方のアジャスタが確実に固定されていること ・ドア閉鎖時装置が動かないこと
	✓	ドアロックユニット作動確認 ・ドアをゆっくり閉めロック検知の有/無をタッチパネル表示と開閉動作で確認		✓	外装確認 ・有害なキズ・汚れがないこと
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認 ・ドア緊急時開放スイッチ操作時、ドア開放すること	制御	✓	タッチパネルの確認 ・スイッチ操作時の反応がスムーズ ・ディスプレイの色あせ・表示不良、キズ・汚れがないこと
	✓	タッチパネルドア開放スイッチON時の開放状態 ・スイッチON時ドアが約50mm開くこと		✓	運転プログラムの確認 ・内蔵運転プログラムが正常に動作すること
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付確認 ・配線、配管を確実に取付け、外れないこと	制御	✓	入力・出力確認 ・短縮モード運転時、内部機器が正常に運転し、表示(LED、タッチパネル表示)が正常なこと
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ ・ホースの折れ、曲がりがないように引回していること ・洗剤ラック収納、引出時配管、配線が接触しないこと		✓	洗净性能 ・インジケーターによる残渣判定(TOSI)を使用 規定の位置に設置し洗净効果を確認
	✓	洗剤・仕上剤投入量校正確認 ・洗剤校正 基準:50mL±2mL 計測値:50 mL ・仕上剤校正 基準:50mL±2mL 計測値:50 mL	性能評価		
	✓	ローラーポンプの動作確認 ・動作状態、異音、エアカミがないこと		✓	付属品、オプション品の確認 ・付属品、オプション品が全て揃っていることを確認
給排水	✓	水道水、温水給水量校正確認 (変更が生じた場合()内記載) ・水道水 基準:10L (変更あり/なし) () ・温水 基準:10L (変更あり/なし) ()	その他	✓	運転説明 ・お客様に装置の運転、注意事項について説明を行うこと。
	✓	外部給水ホースの取付状態 ・WDとの接続部、上水/温水既設配管との接続部に損傷、水漏れがないこと ・無理な曲げ、圧迫がないこと		✓	装置運転 ・装置運転時異音・振動がないこと
	✓	外部排水/オーバーフローホースの取付状態、水漏れ ・WDとの接続部、排水口との配管接続部に損傷、水漏れがないこと ・排水口からの逆流がない配管がされていること ※WD排水口より高い位置に配管されている 出口に背圧がかかる			
電気系	✓	電源スイッチの作動状態(タッチパネル表示を確認)			
	✓	SDソケットの反応・汚れ ・SDカードの出し入れがスムーズにできること			
	✓	行程表示LEDの点灯 ・行程LEDを順次点灯させ確認			
	✓	電源コード・プラグ確認 ・表面にキズ・よれ・汚れがないこと ・装置等でつぶされていないこと			

備考

設置料金 35,000円

(取扱説明書は、オトクレツ設置で請求)