

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地1-70番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

お客様	名称	中川 南科 ケン 7	製造番号	13090015	ご確認	
	住所	岡山県岡山市東区西大寺新地1-70番6	納入検査実施日	2014/1/19		
	納入場所		納入検査実施者	山崎 芳子		

項目	合否判定	検査項目	項目	合否判定	検査項目
ドア	✓	フックの取り付け状態・作動確認 ・ドアをゆっくり閉めスムーズに開閉ができることを確認	電装系	✓	タッチパネルの確認 ・スイッチ操作時の反応がスムーズ ・ディスプレイの色あせ・表示不良、キズ・汚れがないこと
	✓	フック検出ユニット作動確認 ・ドアをゆっくり閉めスイッチ検知の有/無をタッチパネル表示と開動作で確認		✓	電源スイッチの作動状態(タッチパネル表示を確認)
	✓	ドアロックユニット作動確認 ・装置運転時、ドアが確実にロックされていることを確認		✓	SDソケットの反応・汚れ ・SDカードの出し入れがスムーズにできること。
	✓	蓋板、パッキンの確認 ・蓋板にキズ、汚れがないこと ・パッキンに取付不良、キズ、汚れがないこと		✓	行程表示LEDの点灯 ・行程LEDを順次点灯を確認する。
缶体	✓	缶体外観 ・割れ・キズ・腐食・汚れがないこと	外装・設置	✓	電源コード・プラグ確認 ・表面にキズ・よれ・汚れがないこと ・装置等でつぶされていないこと
	✓	滅菌温度センサ外観 ・キズ・腐食・汚れがないこと		✓	本体の水平確認 ・水準器により装置設置条件の水平を取る
	✓	網カゴ外観 ・キズ・腐食・汚れがないこと		✓	アジャスタフット設置状態 ・装置前部のアジャスタが確実に固定されていること ・装置前部が後部より5mm高くなるよう調整されていること
	✓	缶内ストレーナー外観 ・キズ・腐食・汚れがないこと		✓	外装確認 ・有害なキズ・汚れがないこと
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ ・タンクに水を入れ、損傷、水漏がないことを確認	制御	✓	制御パネルカバー確認 ・キズ・汚れ・損傷
	✓	下部給水弁の漏れ ・タンクに水を入れ、損傷、水漏がないことを確認		✓	運転プログラムの確認 ・内蔵運転プログラムが正常に動作すること
	✓	蓋・取っ手外観 ・割れ・キズ・汚れがないこと		✓	入力・出力確認 ・リークチェックテスト、B & Dテストプログラム運転時、内部機器が正常に運転し、表示(LED、タッチパネル表示)が正常なこと
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ ・タンクを装置にセットし、フロートスイッチがON/OFFすること ・スイッチ作動に影響を与える損傷、汚れがないこと		✓	細管内の蒸気浸透性能確認。 ・HOLLOW A またはO-PCD(黄)にて性能確認 クラス22インジケータの変色を確認 黄⇒黒 ※備考欄にインジケータ塗付
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ ・納品時タンク内の衛生が保たれていること	性能評価	✓	リークチェック確認 ・バキュームテストにより缶体、真空ラインにリークがないことを確認する。
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ ・フロートスイッチがON/OFFすること ・スイッチ作動に影響を与える損傷、汚れがないこと		✓	付属品、オプション品の確認 ・付属品、オプション品が全て揃っていることを確認
				✓	運転説明 ・お客様に装置運転、注意事項について説明を行うこと。
			その他	✓	装置運転 ・装置運転時異音・振動がないこと

備考	出張料金	2,000円	(往復 20km × 100円)
	駐車場料金	3,500円	
	設置料金	20,000円	
	合計	25,500円	

お客様用

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書




株式会社IHIシブウラ

環境事業部 環境サービスG

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番5

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9530

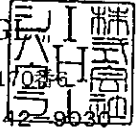

お客様	名称	中川歯科クリニック	製造番号	13090013	ご確認	
	住所	港区北青山4-3-10-7-3F	納入検査実施日	2018/1/18		
	納入場所		納入検査・会社・実施者	4127212 381(株)		

項目

項目	合否判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認 ・通常のタッチパネル開放操作が可能なこと ・閉める時にスムーズに閉めることができること	外装・設置	✓	本体の水平確認 ・水準器により装置設置条件の水平を取ること
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ確認 ・目視でパッキンキズ、歪み、汚れがないこと ・運転時ドア付近から水漏れがないこと		✓	アジャスタフット設置状態 ・装置前方のアジャスタが確実に固定されていること ・ドア開閉時装置が動かないこと
	✓	ドアロックユニット作動確認 ・ドアをゆっくり閉めロック検知の有/無をタッチパネル表示と開閉動作で確認		✓	外装確認 ・有害なキズ・汚れがないこと
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認 ・ドア緊急時開放スイッチ操作時、ドア開放すること	制御	✓	タッチパネルの確認 ・スイッチ操作時の反応がスムーズ ・ディスプレイの色あせ・表示不良、キズ・汚れがないこと
	✓	タッチパネルドア開放スイッチON時の開放状態 ・スイッチON時ドアが約50mm開くこと		✓	運転プログラムの確認 ・内蔵運転プログラムが正常に動作すること
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付確認 ・配線、配管を確実に取付け、外れないこと	性能評価	✓	入力・出力確認 ・短縮モード運転時、内部機器が正常に運転し、表示(LED、タッチパネル表示)が正常なこと
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ ・ホースの折れ、曲がりがないように引回していること ・洗剤ラック収納、引出時配管、配線が接触しないこと		✓	洗浄性能 ・インジケータによる残渣判定(TOSI)を使用 規定の位置に設置し洗浄効果を確認
	✓	洗剤・仕上剤投入量校正確認 ・洗剤校正 基準:50mL±2mL 計測値:50 mL ・仕上剤校正 基準:50mL±2mL 計測値:50 mL	その他	✓	付属品、オプション品の確認 ・付属品、オプション品が全て揃っていることを確認
	✓	ローラーポンプの動作確認 ・動作状態、異音、エアカミがないこと		✓	運転説明 ・お客様に装置の運転、注意事項について説明を行うこと。
給排水	✓	水道水、温水給水量校正確認 (変更が生じた場合()内記載) ・水道水 基準:10L (変更 あり/なし 10 L) ・温水 基準:10L (変更 あり/なし 10 L)		✓	装置運転 ・装置運転時異音・振動がないこと
	✓	外部給水ホースの取付状態 ・WDとの接続部、上水/温水既設配管との接続部に損傷、水漏れがないこと ・無理な曲げ、圧迫がないこと			
	✓	外部排水/オーバーフローホースの取付状態、水漏れ ・WDとの接続部、排水口との配管接続部に損傷、水漏れがないこと ・排水口からの逆流がない配管がされていること ※WD排水口より高い位置に配管されている 出口に背圧がかかる			
電装系	✓	電源スイッチの作動状態(タッチパネル表示を確認)			
	✓	SDソケットの反応・汚れ ・SDカードの出し入れがスムーズにできること			
	✓	行程表示LEDの点灯 ・行程LEDを順次点灯を確認			
	✓	電源コード・プラグ確認 ・表面にキズ・よれ・汚れがないこと ・装置等でつぶされていないこと			

備考

設置料金 35,000円

(お見積りとは、オートクレーン設置で精算)