

受 付 表 (A) 2016年1月18日		部門	受注タイプ			受付No	入力済印	部門名:機械事業本部環境営業部		
		94	1:受注	5 I/O	6 R/O			7 P/O	所属長	担当
										
コード	450046				コード	1				
得意先名 株式会社モリタ 仕入本部 仕入部 商品仕入グループ 殿			支所/県		注文書参照/別紙参照			工番:84088 備考		
元伝/前送伝No	出荷日	到着日	入出荷 部門	請求区分	部品 レス率	オーダーNo/工番費目		立替諸掛		返品理由
	1月18日	1月18日	94	1本 2直 3単	%			0		
ライン No	品目コード/工番	品目名		数量	レス率	単価(仕切)	小計(仕切)	出荷 部門	決定伝票No	
	84088	スポット点検BC-17		1		64,000	64,000			
社内メモ										
客先コメント		横浜支店 高橋様 岡田歯科医院様 BC-17スポット保守点検								

記入日	1/18							
伝票種類	1	1:受注	1:受注 2:前送り					
伝票タイプ	0	.	0:無し 1:前送り売上 2:売上返品 3:前送り返品 4:修理倉出し					
得意先情報	コード	得意先名						
	450046	株式会社モリタ 仕入本部 仕入部 商品 仕入グループ						
送り先情報	コード	送り先名		「0」を記入すると「同左」、 「1」を記入すると「注文書参照/別紙参照」と表示				
	1	注文書参照/別紙参照						
元伝/前送伝No								
出荷日	1/18		日付は必ず記入(記入形式:5月5日→5/5) 「到着日」は必着のときだけ記入のこと					
到着日	1/18							
入出荷部門	94		岡山物流:74 環境部品:75 環境営業:94					
部品レス率	通常は不要! 特別に販売するときなどに記入							
オーダーNo	工客先の発注番号などを記入。半角20文字以内							
工事番号	84088		工番 ※工番売上は必須					
立替諸掛	購入先から送り先への送料を記入。(基本送料)							
	コード	名称	個数	レス	単価:定価	単価:仕切	小計:定価	小計:仕切
品目コード1	84088	スポット点検BC-17	1		85,500	64,000	85,500	64,000
品目コード2								0
品目コード3								0
品目コード4								0
社内メモ	納品書に出ない。製品/部品出荷指示票に表示。 全角50文字以内(半角100文字)							
客先コメント	横浜支店 高橋様 岡田歯科医院様 BC-17スポット保守点検 納品書に表示。部品のみ出荷指示票に表示 全角25文字以内(半角50文字)							

[出張修理依頼票]

(受付票)

FAX

㈱IHシバウラ→エムシーサービス㈱

担当者
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

- ☐ 受付報告
☐ 修理報告
☐ 直接修理
が あり ました

株式会社モリタ
横浜

担当者
TEL 045-473-8471
FAX 045-473-8488



次の通り、訪問します

受付No	訪問予定日	受付担当者
	月 日 AM/ PM	

修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日	月 日	担当者
☐ 部品交換の上、完了いたしました。 ☐ 各部調整により、完了いたしました。 ☐ 持ち帰り修理(月 日完了予定です) ☐ 部品待ちの為 月 日に再訪問予定です。 ☐ 見積連絡待ちの為、保留中です。 ☐		

(注)エムシーサービスは

- ・アポイントの結果をこの修理依頼票に記載しモリタ拠点にFAXする。
- ・出張修理完了後(翌日まで)、修理結果をこの修理依頼票に記載し、モリタ拠点宛に必ずFAXする。

下記の通り、出張修理を依頼します。

依頼日	27 年 11 月 30 日	依頼No		担当者	タカハシ
医院名	岡田歯科医院 様				
ご住所	横浜市西区浅間町 5-37-1 TEL 045-311-5963				
製品名	8017	形式		Ser No	
販売店	旭デンタル	設置日		年 月 日	
故障状況	1年定期点検を お願いします。御社より連絡があったため				
訪問希望日	月 日 AM/ PM	保証期間(有 外)			
備考 (IHシバウラコメント)	化 検 済				

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

モリタ用

お客様	名称	国田歯科医院	製造番号	14070132	点検実施日	2015年12月17日	ご承認印	
	住所	横浜市西区浅間町5-379-5	運転時間	438回	点検実施者	星住		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署	横浜、高橋		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度 - 92~93 kPa

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ 清掃
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態 アジャスター外れあり、修正
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 交換
- ☒ エアフィルターをつまみ、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認
✓

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



株式会社IHI

機械事業本部営業部 営業サービス課

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地1-7D-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

121
134
C.
9V
PAT
↑
STE
EN ISO 1
Indic
Month
Pack
Inter
Clas
C-SP
Stent
9