

株式会社IHインバウラ

品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

# IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ横浜支店	担当者名	遠藤 様
ユーザー名	くげぬま海岸歯科医院	お客様担当者	医院長
納品年月日	2016/1/6	機種名/機番	IC Washer/100063
発生年月日	3月7日	発生場所	神奈川県藤沢市鵜沼海岸6-7-12


## 不具合内容

扉が閉まらなくなった。  
ドアロックピン、リミットスイッチが干渉している。

本体アジャスタ調整。  
扉が閉まるように調整し、扉を開け閉めすると  
左下の継手箇所が干渉して音が鳴る。  
音が鳴らないように調整すると扉が閉まらない。

扉も確実に閉まり、開閉時に干渉して音がならないように  
する為には、アジャスタで前面を高くする必要があり  
前面を高くすると、下段ラックを引出した時に、下段ラックが  
自動で入って行ってしまう。

設置工事確認書に装置の水平を取るようにとあるが  
装置を水平にすると、扉が閉まらない(各部で干渉する)などの症状が出ましたが  
水平は取る必要がないのでしょうか。

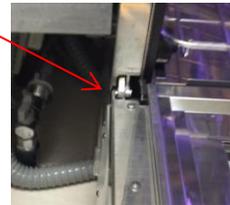

品保本 '16/03/18 太田	品証 '16/03/18 塚本	小 '16/03/18 山
------------------------	-----------------------	---------------------

## 回答

### 【記入欄】

扉が閉まらなくなった原因は、ICWの扉を開け閉めした際に本体が設置位置からずれたため  
ドアロックピンと天板の穴位置がずれた事によると思います。

対策として、アジャスタ下にゴムシートを挟み、本体がずれないようにして対応しました。

アジャスタ調整の際、前面を上げる高さは約3mm程度までとして下さい。

上げ過ぎると下段ラックが奥側に移動します。

設置の際水平を出した後、扉の閉まり具合を確認し、ドアロックピン等が天板穴に干渉する場合は

左右のアジャスターを微調整し、干渉しない位置にて設置し 品証

ください。

品保本 '16/03/30 太田	日 '16/03/30 高	環開 '16/03/30 中村	関 '16/03/30 □
------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------