

株式会社IHシパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

# IC Clave IC Washer 不具合報告書

TEL 046-822-8751  
FAX

支店名	モリタ横浜支店	担当者名	渡辺 様
ユーザー名	神奈川歯科大学	お客様担当者	
納品年月日	2015/11/5	機種名/機番	IC C/100013
発生年月日	2015/11/5	発生場所	神奈川県横須賀市稲岡町82

## 不具合内容

●内容

- 11月5日(木) 設置調整時のバキュームテスト時にエラー13【バキュームテストNG】
  - 11月5日(木) 設置調整時のB&Dテスト時にエラー11【蒸気発生器高温異常】
- ※技術鈴木Sの指示で調整後は再発せず

●原因



## 回答

【記入欄】

原因① バキュームテストNG

雰囲気温度が低い状態で真空引きすることで缶内に結露が発生。  
真空引き後の保持時にその結露が膨張し、真空度が低下したと思われる。



温度制御つまみ(蒸気発生器)

対策①

缶内を加熱する必要があるため、バキュームテスト前に**乾燥運転**または**乾燥込の運転**をする。

原因② 蒸気発生器高温異常

単独でSGヒーターを保護制御しているスイッチが動作した。

対策②

設定値150℃では±14℃で動作してしまうため、最低で136℃  
で動作してしまう。**設定値を170℃に設定し直す**ことで対応。

