

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

IHIシバウラ用

お客様	名称 アコムクリニック 様 住所 川崎市中原区上小田中6-20-3 納入場所	製造番号 14060088 運転時間 1288回 サービス形態 定期・保守・フルメンテ	点検実施日 2016年4月17日 点検実施者 エムサービス(株) 星住 モリタ担当部署	ご承認印
-----	--	--	---	----------

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛け・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの壊れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態盛・漏れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチュウブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
<input checked="" type="checkbox"/>

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
エアーフィルター	1
フレーブルターナー	1
洗剤ポンプチュウブ	2
循環ポンプ	1
給湯用フランク	1



機械事業本部営業部 営業サービスセンター
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地 70-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

<点検・出張修理依頼票兼発注書>

一

(受付票) FAX

担当者	中澤	TEL	086-944-6528
NO.	9157	FAX	086-942-9030
東京SC 星住様			

保守付 報告
修理後、修直があります。

次の通り、訪問します

受付No	訪問予定日	受付担当者
20160316-N	4月17日 AM/ PM	中澤 164-1

修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日	月	日	担当者
<input type="checkbox"/> 部品交換の上、完了いたしました。			
<input type="checkbox"/> 各部調整により、完了いたしました。			
<input type="checkbox"/> 特殊修理(部品待ちの為、見積連絡待ちの為、保留中です。)			
報告内容	月完了予定期		
報告内容	月に再訪問予定期		

修理業者様へ

・アボイントの結果をこの修理依頼票に記載しモリタ拠点にFAXする。

・出張修理完了後(翌日まで)、修理結果をこの修理依頼票に記載し、モリタ拠点宛に必ずFAXする。

株式会社モリタ	
支店・営業所 横浜 遠藤 啓悟 様	
担当者:	090-1613-4545
携帯電話:	045-473-8471
TEL:	045-473-8488
FAX:	

下記の通り、点検・出張修理を依頼します。

依頼日	2016/3/16	依頼No	
医院名	てつお歯科クリニック		
ご住所	神奈川県川崎市中原区6丁目20-3 TDCビル		
	TEL: 044-750-1766		
製品名	<input checked="" type="checkbox"/> WD-150	<input checked="" type="checkbox"/> BC-17	<input type="checkbox"/> スリル殺菌ディスペシャー
	<input type="checkbox"/> IC Washer	<input type="checkbox"/> IC Clave	Ser No
販売店	トラストデンタル	設置日	2014年9月日
故障状況	保守点検契約医院、2014年9月導入後、色々トラブルがあり、IHIIホサムに修理依頼したが、こじら、一ヶ月もかかる事になってしまった。IHIIホサムに修理依頼したが、IHIIホサムに修理依頼したが、IHIIホサムに修理依頃す。他の作業もあり、IHIIホサムに修理依頃す。		
詳細にご記入ください			
訪問希望日	<input type="checkbox"/> AM	契約種類	保証期間
月 日	<input type="checkbox"/> PM	ベーシック	<input type="checkbox"/> 内・ <input checked="" type="checkbox"/> 外

備考 (IHIIシバウラコメント)

保守点検の場合: 部品交換(有・無)