

ICW IM-205-1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地10-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

## ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

|     |             |                     |                   |             |    |         |
|-----|-------------|---------------------|-------------------|-------------|----|---------|
| お客様 | 名称          | 海老名歯科 口腔外科 クリエック    | 製造番号              | 100229      | 確認 | IHIシバウラ |
|     | 住所          | 神奈川県 海老名市 中央3丁目3-18 | 納入日               | 2017年 6月 8日 |    |         |
|     | 中村 繁一 ボール/F | 納入検査実施者             | エムシーサービス(株) 磐下 金子 |             |    |         |

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目     | 判定                                                                    | 検査項目                                |
|-------|----|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                         | 外装・設置  | ✓                                                                     | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |        | ✓                                                                     | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                  |        | ✓                                                                     | キズ・汚れ                               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |        | ✓                                                                     | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース   | ✓                                                                     | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御     | ✓                                                                     | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ         |        | ✓                                                                     | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                       |        | 有                                                                     | ラック仕様切替(ハントビースラック・標準ラック)            |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                   |        | 無                                                                     | 温水使用切替                              |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能   | ✓                                                                     | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |        | ✓                                                                     | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)    |        | ✓                                                                     | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |        | ✓                                                                     | 運転・お手入れ方法の説明                        |
|       | ✓  | 給湯温度(45~50℃)                   |        | ✓                                                                     | 装置内運転時異音・振動                         |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              | その他    |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                    |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                   |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             | 運転検査結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 不良 | トシ                                  |

特記事項