

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018年 05月 16日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 16 日 作業時間： 10 Hr
顧客名	きぬた歯科 TEL： 045-935-1186
所在地	神奈川県横浜市都筑区池辺町5486-3 リバーサイド中河1F ご担当 ー 様
販売店	株式会社モリタ 横浜支店 ご担当 ー 様
納入年月日	2016 年 4 月 3 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100101	運転回数： 447回	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ① 水漏れによるタッチパネル不良
- ② 槽内温度低下異常

原因

- ① ドア下部のシリコンシートが動いたことで水漏れが発生し、タッチパネルの電源(DC5V)がショートしていました。
- ② 槽内温度低下異常：洗浄器材の干渉によって温水がセンサーに触れず、温度計測がえきなかったため異常停止しました。

処置、作業内容

- ① ドアシリコンシートを固定しました。また、DC5V電源を交換しました。
 - ② 異常停止検知時間を300秒→500秒に変更しました。
- 併せて、温度センサー間差の設定範囲を3℃→10℃・判定時間60秒→120秒に変更しました。

特記事項

洗浄槽下部のフィルターに目詰まり・器材の混入がありました。部品破損に繋がりますので、こまめな清掃をお願いいたします。
器材の入れすぎは洗浄・消毒不良の原因となります。量・配置にご留意ください。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シリコンシート固定金具取付		1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3	DC5V電源		1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

斎波

羅田

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐 '18/05/16 野	桐 '18/05/16 野