

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 05月 17日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 17 日 作業時間: 10 Hr
顧客名	横浜フォルテ矯正歯科 TEL: 045-620-6552
所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100066	運転回数: 1697	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① ドア全面下部右側より水漏れ

原因

① ドア下部シリコンシート固定不良

処置、作業内容

① シリコンシート固定組直し

② ドア開閉対策部品交換

③ 定期交換部品交換

特記事項

① 洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります
ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします ② 定期交換部品については有償になります。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1 セット		
2	定期交換部品 DPIチューブ		1 セット		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 2018 年 5 月 17 日
 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
 谷川ビルディング ANNEX 館 4F
 電話: 045-620-6552
 印

修理業者 株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者