

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 6月 22日

機種/型式	ワッシャー・ディスプレイ - IC Washer		
作業年月日	2018年 6月 22日	作業時間:	Hr
顧客名	中川歯科クリニック 様	TEL:	03-3486-6480
所在地	東京都港区北青山 3-10-9	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2016年 1月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100082	運転回数: 1468回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・乾燥ヒーターの水濡れ、錆び

原因

・乾燥ライン内に結露がで、ヒーターBOX内に溜まりました。

処置、作業内容

・乾燥ラインの部品一式を交換しました。
 また、プログラムを最新版(結露防止プログラム)へ更新しました。
 ・その他、ドア開閉用部品を交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ヒーター		1		
2	乾燥ファン		1		
3	ドア開閉部品(ワイヤ、プーリー)		1		
4	ドアシールシート		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 6月 22日
 〒107-0061 東京都港区北青山3-10-9
 川島ビル3F

電話 (03) 3486-6480

中川歯科クリニック 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者

2016 年 5 月 17 日

(株)IHI シバウラ

環境制御機器開発 Gr

装置パラメーター確認要領書

1. ICW パラメーターの確認

タッチパネルより、お客様の装置使用状況(各パラメーター)を確認し、記録を残してください。

交換作業終了後に、記録した各パラメーターの再入力をお願いします。

2. お客様の仕様確認

お客様がどの運転モードを選択しているか確認してください。

運転モード	80℃	90℃	93℃	洗浄	すすぎ
乾燥			有り / 無し		
仕上剤			有り / 無し		
担当者					

担当者	No.1:	No.2:	No.3:
	No.4:	No.5:	No.6:
施設			

画面操作 ①オプション → ②設定 → ③担当者

AUTO OFF 設定時間	3 分
---------------	-----

画面操作 ①オプション → ②設定 → ③AUTO OFF

LED 設定	シンプル	スタンダード
--------	------	--------

画面操作 ①オプション → ②設定 → ③LED 設定

SUS フィルター	1468 回
Serial No.	100082

画面操作 ①オプション → ②メンテナンス → ③ユーザー

※標準ラックを使用されている場合は、SUS フィルターの使用回数はありません。

※SUS フィルター使用回数が 40 回を超えている場合、SUS フィルターの交換を説明してください。

74f. 2a 0L02
CPU 1001019

メーカーメンテナンスの情報確認

メーカーメンテナンス情報の確認をお願いします。

画面より、①オプション → ②メンテナンス → ③メーカー → ④「9060」を入力して、メーカーメンテナンス画面に切り替え、各情報記録してください。

給水種	水道のみ	温水併用
-----	------	------

給水種については、給水口を確認して温水が併用されているか確認してください。

画面操作 ①基本設定 → ②給水種一括設定

ハンドピースラック	使用	不使用
-----------	----	-----

画面操作 ①基本設定 → ②ハンドピースラック

①機器の設定を押し、機器の設定画面 1/9 ～ 9/9 の情報を確認してください。

確認が必要な項目のみ記載

画面			
1/9	給水量 : 11 L	熱水消毒給水量 : 12 L	通常排水 : 90 秒
2/9	エラー排水時間 : 90 秒	凝縮開始温度 : 80℃ → 初期 : 65℃	排水冷却開始 : 60℃
3/9	検知許可時間 : 25 秒	給水限度時間 : 300 秒	給湯限度時間 : 500 秒
4/9	給水カウント : 128	給湯カウント : 232	
5/9	洗剤遅延検知 : 25 秒	洗剤カウント : 50	仕上剤カウント : 450
6/9	加温限度時間 : 300 秒	温度補正值 : 1	
7/9	HP フィルタ交換警告 : 20	温度センサ間差 : 3℃ : 45 秒	循環圧検知 : 10 秒
8/9	洗剤残量カウント : 5 回	洗剤残量警告有効 : ON	
9/9	仕上剤残量カウント : 5 回	仕上剤残量警告有効 : ON	

交換部品リセット

定期メンテナンス	1468	✓
SUS フィルター	1468	✓
洗剤ポンプチューブ	1443	✓
仕上剤ポンプチューブ	5	✓
HEPA フィルター	5	✓
ドアパッキン	1469	✓
合計工程回数	1469	✓