

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 05月 29日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 22 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	あい歯科医院 様 TEL: 0466-23-0999
所在地	神奈川県藤沢市弥勒寺3-12-15 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100090	運転回数: 1463	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 本体内部水漏れによるシャットダウン			
原因			
① 全面ドア下部より漏れた水が主電源SWに入り漏電が発生			
処置、作業内容			
① シリコンシート固定			
② 主電源分解清掃を実施後電気試験器絶縁抵抗器にて測定結果良好です			
特記事項			
① 運転確認すべて正常です			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シリコンシート固定金具取付		1		
2	ドア開閉対策部品		1 セット		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 6 月 12 日

ご署名 松本 幸輔 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/05/22 桐野	環PJ '18/05/22 桐野