

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 11月 16日
【対応日】 2018年 11月 16日
【連絡元】 ■モリタ (担当者: 東京 山下 様)
□ユーザー
□その他 ()
【ユーザー名&県名】 神奈川県 みつえ歯科

WD-150【機番: 14070111】

IC Clave【機番: 】

【症状】 エラー8
循環水圧低下

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)
■現地対応
《対応内容》 □部品交換 ()
■その他 (調整)

【給水方法】 ■水
□水 & お湯

【ラック種類】 ■標準ラック
□ハンドピース用ラック
《メクラ栓の使用》 □有 □無
《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【備考】
洗剤・仕上剤ポンプチューブ劣化により、槽内への洗剤供給が過多で洗浄時に過発泡による
※メンテ実施依頼しました。

【症状】

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)
□現地対応
《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 □アイオニー使用
□精製水購入
□その他 ()

【滅菌バッグ】 □ディスポ
□リユース

【網の種類】 □トレイ棚
□網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】