

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 23日

機種/型式	ワッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018年 11月 23日		作業時間: 6 Hr
顧客名	くげぬま海岸歯科クリニック	様	TEL: 0466-54-7886
所在地	神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12 パストラル鵠沼1F		ご担当 様
販売店	(株)モリタ 横浜支店		ご担当 様
納入年月日	2016年 3月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100099	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
本体底面への水漏れ		
原因		
乾燥ラインのジョイントに亀裂が入っている		
処置、作業内容		
乾燥ラインのジョイントを交換する		
特記事項		
洗浄槽内フィルターに詰まりがあまりない		
エラー、故障の原因となりますので、定期的な清掃をお願いいたします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	エアレ型ジョイントA湯風		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

くげぬま海岸歯科クリニック

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 くげぬま海岸歯科クリニック 御中 製造番号 100099
住所 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12 パストラーレ鵠沼1F
点検日 2018年 11月 23日
点検時間 ~ 点検者 IAT 桐野、川本

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸六丁目17番12号
パストラーレ鵠沼1階

~~ぬま海岸歯科クリニック~~

医療法人社団くげぬま海岸歯科クリニック

2018年 月 日

ご署名 理事長 三 浦 陽 平



本作業にて知れた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528