

《不具合対応報告書》

担当者: 中村 菊池

【発生日】 2018年 10月 2日
【対応日】 2018年 10月 9日 設置
【連絡元】モリタ(担当者:)
ユーザー
その他()
【ユーザー名 & 県名】飯田デンタルオフィス 神奈川

IC Washer【機番: 】

【症状】

【対応方法】引取り修理(代替機no.)
現地対応
《対応内容》 部品交換()
その他()

【給水方法】水
水 & お湯

【ラック種類】標準ラック
ハンドピース用ラック
《メクラ栓の使用》 有 無
《SUSフィルターの洗浄》 有 無

【備考】

特記事項

- ・滅菌バッグの並べ方
縦に正しく入れていた。しかし、量が多く、入りきらないものは平置きしていたので、縦にうまく入れていただくよ
き厳禁と伝えた。
- ・シリコンパッドを含むツールケース
かなりの重量がある。(手で持った感覚4kg程度か?)シリコンを含むので、滅菌バッグ(このサイズは所有して
菌シート使用)に必ず入れるようお願いした。
- ・オイル
ハンドピースのオイルは必ず除去して、滅菌バッグに入れるようお願いした。
- ・アイオニー

IC Clave【機番: 100167】

【症状】

月曜の朝一番にER18発生することが多い。
対象物を大量に入れているためと考えられる。
10/2 初めてER11発生。

【対応方法】引取り修理(代替機no.)
現地対応
《対応内容》 部品交換()
その他()

【給水方法】アイオニー使用 アラーム発生時フィルター交換実施(1回/2か月の頻度)
精製水購入
その他()

【滅菌バッグ】ディスポ
リユース

【網の種類】トレー棚
網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 有 無

【設置場所】テーブルの下 移動台の上に載せる。

【対策内容】

1. 缶内用安全弁が230kpaで作動した。⇒240kpaに調整した。
 2. 真空電磁弁から軽微なリークあり。⇒新品交換
 3. 圧力センサ2kpaずれ。⇒新品交換
- これらの要因にてER18, 11が発生したと考えられる。