

点検・修理報告書

管理 No. 2019.03.26

発行日: 2019年 03月 26日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 3 月 26 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	室伏歯科医院 様 TEL: 0465-62-3234
所在地	神奈川県足柄下郡湯河原町宮下533 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 横浜支店 ご担当 武田 様
納入年月日	2016 年 3 月 18 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100087	運転回数: 1142	タッチパネル Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラーNo.18 乾燥ヒーター異常			
原因			
① 乾燥ヒーター接続配線（ハーネスB接点）の端子接続不良による異常検出			
処置、作業内容			
① 乾燥ヒーター配線の再接続をおこないました			
特記事項			
槽内下部フィルターの定期的な清掃をお願いいたします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 26 日

〒259-0304 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下533

ご署名 室伏 歯科 医院

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

院長

TEL

責任技術者	作業者
0465-6234	34
19.3.26	19/03/26
田	野