

点検・出張修理依頼書 兼 発注書

発信元: 株式会社モリタ
 拠 点: 横浜
 担当者: 原
 TEL(携帯): 045-473-8471
 F A X:

依頼日 2019 年 2 月 22 日

- 依頼内容
- ☒ 出張修理依頼
☐ 保守点検(契約有り)
☐ スポット点検(契約無し)
☐ その他



送り先: 株式会社IHシバウラ 行
 T E L: 086-944-6528
 F A X: 086-942-9030
 担 当 者:

機種		☒ WD-150 ☐ IC Washer		☐ BC-17 ☐ IC Clave		☐ スリッパ殺菌ディスペンサー
ウオッシャー・ディスインフェクター		オートクレーブ				
医院名				ご担当者		
てっお歯科クリニック						
ご住所				TDCビル2F		
神奈川県川崎市中原区上小田中6-20-3				TEL 044-750-1766		
製品名: 上記記載いたしておりますが、念のため再度機種の確認をお願いします。				シリアルNo.		
WD-150						
販売店				納入日		
一色タカナワ 川崎店 (トラストデンタル)				年 月 日		
訪問希望日時		保証期間		保守契約		
年 月 日 時~		(内・外)		種類		
故障状況(できるだけ詳細に)				エンジン修理依頼 (080-4791-5164) 本日 22日 14:30 ~ 訪問 → 異常なし 但し 燃料切れ 温度センサー異常。 水曜にエラー発生、その後復帰。 金曜 朝2回連続エラー 3回目復帰。 本日 14:30 ~ 確認希望: 16:00 ~ 25日。 月曜に再度連絡して 火曜に代替対応の判断		
備考				歯科医院へ連絡して 言明と確認をお願いいたします。 小笠原入替		

WD-150 温度センサー 異常対応

エムシー金子さんへの指示

① 確認項目

- 1) ツウ内天井についているセンサーに汚れがつかないか 確認清掃
- 2) 上段のスペースヒルと中段のスペースヒルが逆についてないか 確認 (上段は穴が下, 中段は穴が上)
- 3) 下パネルをはずし、基板の一番左上についているコネクタのケーブルがゆるんでないか 確認。
※ 1度抜いて、改めて差し込み、左右のツマがカチンとなるのを確認する

▶ 上記1,2,3を行い、短絡運転をする

・30秒で1℃上がればOK.

・約1分で1℃上がらな5 NG. ⇒ SSR の故障
(ソリッドステートリレー)

SSR 故障の場合.

SSRの部品交換をすることがないが、温水併用が
水のみ使用に換えれば、エラーなく動く。

後日対応が可能となる。