

お客様	名称	内藤歯科医院	製造番号	14080166	点検実施	2018/8/12	ご承認印	内藤
	住所	神奈川県横浜市内西区高島2-3-21 3F	通称回数	1754回	点検実施	エムシーサービス株式会社		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

ドア機能

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | 開閉動作確認 |
| ✓ | ドアバックシヨ目視点検 |
| ✓ | ドアフックの掛かり・締め付け量確認 |
| ✓ | ドア締め付けスイッチ作動確認 |
| ✓ | インターロック動作確認 |
| ✓ | テンションスプリングの取付け状態・伸び |
| ✓ | ドアパネルの取付け状態・キズ |
| ✓ | ドアヒンジの動作 |
| ✓ | ドア緊急時開放スイッチ機構確認 |
| ✓ | ドア開放スイッチON時の開放状態 |

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ記録、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

- | | |
|---|------------------------|
| ✓ | 乾燥ファンの取り付け状態 |
| ✓ | 乾燥ファンの作動状態・異音 |
| ✓ | 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化 |
| ✓ | プレフィルターの汚れ |
| ✓ | メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター) |

配管系

- | | |
|---|-------------------------|
| ✓ | ストレーナーの清掃(給水・給湯) |
| ✓ | 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ |
| ✓ | 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ |
| ✓ | 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 給水弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 給湯弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | RO水弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 給水タンクの取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 排水タンクの取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 逆順類の取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 乾燥エリア回路逆弁の作動状態・漏れ |

ポンプ

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ | 循環ポンプの取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 循環ポンプの作動状態・異音 |
| ✓ | 防振ゴムの取り付け状態・劣化 |
| ✓ | 排水ポンプの取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 排水ポンプの作動状態・異音 |

洗滌槽

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ☒ | キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無 |
| ☒ | 槽内LEDが各工種色で点灯している |
| ☒ | 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態 |
| ☒ | 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃 |
| ☒ | ラック接続ゴムブッシュのへたり・磨れ |
| ☒ | 排水口フィルターへの汚れ・詰まり |
| ☒ | 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形 |
| ☒ | ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ |

附录五

- | | |
|---|-----------------------|
| ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| ✓ | 電源スイッチの作動状態 |
| ✓ | 行程表示LEDの点灯 |
| ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| ✓ | 各基板のコネクタ・端子確認 |
| ✓ | 端子の緩み・コネクタの接続確認 |
| ✓ | 配線の変色・損傷有無・結束状態 |
| ✓ | 圧力センサーの取付け状態・入力確認 |
| ✓ | ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥) |
| ✓ | SDカードの書き込み確認 |

外匯・股價

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ 糸ズ・汚れ
- ☒ 制御バルブカバナーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアークリナー(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアークリナー(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評價

- ☒
- インジケータによる残留判定(TOSI)

運動後
食 - 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
トアハンギン上	1
トアハンギン下	1
DPI 紐-ブ	2
ゴルフフィルタ	1
HEPA フィルタ	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

宁004-8122 岡山县岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-844-6528

FAX: 086-942-9030