

管理 No.

発行日：2019 年 7 月 30 日

点検・修理報告書

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 7 月 4 日	作業時間：	Hr
顧客名	あざみ野総合歯科医院	様	TEL： 045-905-5955
所在地	神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13 サンサーラあざみ野3F	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2017 年 11 月 日	保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号： 100283	運転回数： 1005	運転回数リセット： <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー11 蒸気発生器高温異常
- ・エラー18 滅菌異常

原因

- ・給水ライン取り回し不良（エラー11）
- ・安全弁不良（エラー18）

処置、作業内容

- ・蒸気発生器、安全弁交換
- ・定期メンテナンス実施、各種調整 運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・蒸気発生器		1		
2	・安全弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償		部品代 合計			
		技術料			
		出張料			
		合計		※定期メンテナンスに含む	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 7月 31日

ご署名 阿古 俊衣 印

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	責任技術者	作業者
		環PJ '19/07/04 富田	環PJ '19/07/04 三宅

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 あざみ野総合歯科医院	製造番号 100283	点検実行日 2019年7月4日	ご承認印 
	住所 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13 サンサーラあざみ野3F	運転回数 1005 回	点検実施者 HIIアグリテック 三宅	
	納入場所	サービス形態 定期メンテナンス	モリタ 担当者 モリタ横浜支店	

計装(安全)

- 圧力計ゼロ設定
- ドア
 - プラケットの溶接状況確認
 - ドアカバーのねじ緩みの確認
 - ドアセンサ作動確認
 - ドアロックセンサ作動確認
 - ドアロックピンの動きの確認
 - 内蓋のキズ・汚れ
 - 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 缶内温度センサの汚れ
- トレー様・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
- 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

- テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 給気弁の動作確認
- 排蒸弁の動作確認
- 真空・排気弁の動作確認
- 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- 回水弁の動作確認(3方弁)
- 排水コネクタの漏れ・破損
- 安全弁(缶内)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- 蒸気発生器からの漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- サーモスタットの設定温度確認
- 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ソケット他溶接割れ・漏れ
- 蒸気発生器からの漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- サーモスタットの設定温度確認
- 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- 蓋の損傷・剥れ
- フロートセンサー(L)の作動確認
- フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動確認

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター接続確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- SD基板の腐食の確認

外装・設置

- 設置場所の水平確認
- 本体のフロント側が高いことの確認
- アジャスターの緩み・破損の確認
- 刮削パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- 日&Dテスト実施
- コンパクトPCDによる判定
- TESTバキューム
- 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

合 否

インジケータ貼り付け

[]

*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・IC Clave用ドアパッキン	1
・蒸気発生器	1
・安全弁	1

株式会社HIIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030