

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 7月 18日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 7 月 16 日 作業時間： Hr
顧客名	たいよう歯科クリニック 様 TEL： 046-278-4618
所在地	神奈川県大和市下鶴間2777-5-6 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100138	運転回数： 682	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー1 漏洩検出			
・タッチパネル故障			
原因			
・循環水ライン樹脂継手亀裂による水漏れ			
・水漏れによるDC5V電源ショート			
処置、作業内容			
・樹脂継手交換			
・DC5V電源交換、防滴カバー取付			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		6		
2	DC5V電源		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 19 日

ご署名

前田 瑞貴

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/07/16 富田	環境PJ '19/07/16 桐野

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 たいよう歯科クリニック 御中 製造番号 100138
住所 神奈川県大和市下鶴間2777-5-6
点検日 2019年 7月 16日
点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2019年 7 月 19 日

ご署名

前田 瑞貴

印

本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528