


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 4 月 22 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 4 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	てつお歯科クリニック 様	TEL： 044-750-1766	
所在地	神奈川県川崎市中原区上小田中6-20-3 TDCビル2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060088	運転回数： 3571
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水		
原因		
・乾燥ライン継手エルボの老朽化による劣化が発生させた漏水で、 その漏れた水が排水ポンプにかかり排水ポンプのコンデンサーが故障し破損		
処置、作業内容		
・洗浄槽内排水フィルター、排水ポンプ交換 ・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

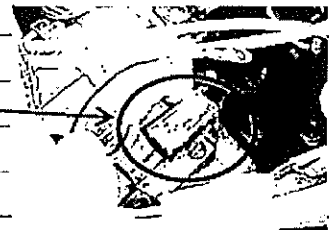

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・WD-150用 洗浄槽内フィルター		1		
2	・WD-150用 排水ポンプ		1		
3					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 24 日

ご署名

朝比 哲夫



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '18/4/15 富田	環境PJ '18/4/15 安田