

ICW IM-205-1

株式会社IHアグリテック  
環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

## ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

モリタ用

|     |    |               |                |            |     |        |
|-----|----|---------------|----------------|------------|-----|--------|
| お客様 | 名称 | たむら歯科         | 製造番号           | 100807     | ご確認 | E17-21 |
|     | 住所 | 神戸市東灘区東灘1-3-2 | 納入日            | 2019.11.26 |     |        |
|     |    | 納入検査実施者       | エム・エス・エス(株) 大上 |            |     |        |

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目     | 判定                                                                              | 検査項目                                |
|-------|----|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                         | 外装・設置  | ✓                                                                               | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |        | ✓                                                                               | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                  |        | ✓                                                                               | キズ・汚れ                               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |        | ✓                                                                               | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース   | ✓                                                                               | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御     | ✓                                                                               | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ         |        | ✓                                                                               | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                       |        | ✓                                                                               | ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)            |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                   |        | 有・無                                                                             | 温水使用切換                              |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能   | ✓                                                                               | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |        | ✓                                                                               | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)    | その他    | ✓                                                                               | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |        | ✓                                                                               | 運転・お手入れ方法の説明                        |
|       | ✓  | 給湯温度(45~50℃)                   |        | ✓                                                                               | 装置内運転時異音・振動                         |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              | 運転検査結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 不良<br><br>OK |                                     |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |        |                                                                                 |                                     |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                    |        |                                                                                 |                                     |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                   |        |                                                                                 |                                     |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |        |                                                                                 |                                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             |        |                                                                                 |                                     |

特記事項