

点検・修理報告書

管理 No. 20092

発行日: 2020年7月 22日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年7月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	横浜フォルテ矯正歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内□ 外□ 付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 □
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □

装置情報	製造番号: 100066	運転回数: 3264回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 2 洗浄槽満水エラーが発生した。

原因

・排水ラインの配管にごみが詰まっておりました。そのため、排水能力が低下し、洗浄槽満水エラーが発生したと考えられます。

処置、作業内容

- ・配管に詰まったごみを除去しました。
- ・スプレーアームも詰まっておりましたので、清掃いたしました。
- ・フィルター 3 を設計変更いたしました。変更品に交換させていただきました。

特記事項

・ドアパッキンから少し水漏れがありましたので、漏れないように調整させていただきました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

合計

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 27 日

ご署名 伊藤 咲也香 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/07/22	20/07/22	20/07/22