

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	飯田デンタルオフィス 様	製造番号	100108	点検実施日	2020年9月27日	承認印	
	住所	神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64	運転回数	919	点検実施者	IHIアグリテック 佐藤		
	納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	受け手担当者	モリタ横浜支店		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ ポンプチューブ	1
・仕上剤ポンプ ポンプチューブ	1
・ドアパッキン一式	1
・HEPAフィルター	1
・プレフィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 飯田デンタルオフィス	製造番号 100481	点検 実施日 2020年9月28日	承認 印	
	住所 神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64	運転回数 821 回	点検 実施者 IHIAグリテック 三宅		
	納入場所	サービス形態 定期メンテナンス	モリタ 担当者 モリタ横浜支店		

計装(安全)

☒ 圧力計ゼロ設定

ドア

☒ ブラケットの溶接状況確認☒ ドアカバーのねじ緩みの確認☒ ドアセンサ作動確認☒ ドアロックセンサ作動確認☒ ドアロックピンの動きの確認☒ 内蓋のキズ・汚れ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無☒ 缶内温度センサの汚れ☒ トレー網・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

☒ テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ 給気弁の動作確認☒ 排蒸弁の動作確認☒ 真空・排気弁の動作確認☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)☒ 回水弁の動作確認(3方弁)☒ 排水コネクタの漏れ・破損☒ 安全弁(缶内)の漏れ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ 蒸気発生器からの漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ サーモスタットの設定温度確認☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ 蒸気発生器からの漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ サーモスタットの設定温度確認☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ☒ シリコンチューブの折れ、裂けの確認☒ 蓋の損傷・割れ☒ フロートセンサー(L)の作動確認☒ フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ☒ フロートスイッチの作動確認

電装系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認☒ 電源スイッチの作動状態☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ☒ 各基板のコネクター緩み確認☒ 線子の緩み・コネクターの接続確認☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

☒ 設置場所の水平確認☒ 本体のフロント側が高いことの確認☒ アジャスタの緩み・破損の確認☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ☒ エアフィルターのおまわり・汚れ

性能評価

☒ B&Dテスト実施☒ コンパクトPCDによる判定☒ TESTバキューム☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

合 ・ 否

インジケータ貼り付け

【 J I H I A G R I T E C K 】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・ドアパッキン	1

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6523

FAX:086-942-9030