

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式			
作業年月日	年 月 日	作業時間： 4 Hr	
顧客名	吉江歯科医院 様	TEL：	
所在地	神奈川県川崎市高津区新作6-16	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 9 月 23 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号： 14070112	運転回数： 949
------	----------------	-----------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー31 缶内加圧異常

原因

・真空ポンプの性能低下による真空時間オーバーによるヒーター過熱になり缶内加圧になっていました。
 ・排蒸弁が詰まり気味でした。

処置、作業内容

・真空ポンプ交換
 ・排蒸弁が詰まり排蒸が抜けない状態だったので交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	排蒸弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 _____ 印 _____

修理業者

株式会社HIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービス '20/12/24 富田	環境PJサービス '20/12/24 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

お客様	名称	吉江歯科	製造番号	14070112	点検実施日	2021/1/12	承認印
	住所	神奈川県川崎市高津区新作6-16	運転回数	974	点検実施者	IHIアグリテックサービスGr	
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署		

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット動作確認
 - ドアロックユニット動作確認
 - 蓋板のキズ・汚れ
 - 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内(現地設置時)
- アジャスタフットの緩み・設置状態(現地設置時)
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターつまり・汚れ

性能評価

- ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック

インジケータ貼り付け



運転確認	
含	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030