

点検・修理報告書

管理 No. 20475

発行日: 2021/2/3

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2021年2月1日 作業時間: 8 Hr
顧客名	高田歯科医院 様 TEL: 045-562-3589
所在地	神奈川県横浜市港北区下田町2-16-29 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 5 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100136	運転回数: 2085回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・ドア開閉時に異音がする。

原因

・ドアのダンパーが外装と接触し、異音を発生しておりました。

処置、作業内容

・ダンパーの取り付け調整をいたしました。

特記事項

・乾燥ヒーターが劣化しておりましたので、交換いたしました。

・ドアロック機構の部品カム1, 2を交換いたしました。


交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 乾燥ヒーター		2		
2 カム1		1		
3 カム2		1		
4				
5				
6				
7				
1.有償 2.無償			部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

2021年 2月 9日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	高田歯科医院 様	製造番号	100136	点検実施日	2021年2月1日	承認印	
	住所	神奈川県横浜市港北区下田町2-10-28	運転回数	2085	点検実施者	IHIアグリテック 佐藤		
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当者			

ドア機能

- ドア開閉動作
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ドア締め付けスイッチの作動
- インターロックの作動
- テンションスプリングの取付け・伸び
- ドアパネルの取付け・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア手動開放レバーの作動
- ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの作動
- 薬剤投入量
- 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取付け
- 乾燥ファンの作動・異音
- 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- 乾燥ヒータの作動
- プレフィルタのつまり・汚れ
- HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 給水弁の作動・漏れ
- 給湯弁の作動・漏れ
- 水位圧カスイッチの取付け・漏れ
- 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け・漏れ
- 循環ポンプの作動・異音
- 防振ゴムの取り付け・劣化
- 排水ポンプの取り付け・漏れ
- 排水ポンプの作動・異音
- 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- 槽内LEDの点灯
- 洗浄アームの回転
- 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- 加熱ヒータの汚れ・損傷・変形
- ヒータ過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示
- 電源スイッチの作動
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み
- 端子の緩み・コネクターの接続
- メモリーカードへの書き込み確認
- 圧力センサーの取付け
- ヒーター配線の緩み・変色(加熱・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- 外装の汚れ・損傷
- 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ドアパッキン
- プレフィルタ
- HEPAフィルタ
- 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合
否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ DPIチューブ	1
・仕上剤ポンプ DPIチューブ	1
・ドアパッキン一式	1
・HEPAフィルタ	1
・プレフィルタ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030