

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHアグリテック用

お客様	名称	センター北&こども歯科 様	製造番号	100433	ご確認	山キ
	住所	神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-1	納入日	2021年5月18日		
		納入検査実施	エムシーサービス㈱ 金子			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目					
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認					
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態					
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ					
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと					
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと					
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認					
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認					
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)					
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換					
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)					
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致					
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水／湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付					
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明					
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動					
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他							
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認								
	✓	電源スイッチの作動状態								
	✓	SDカードの挿入・取外性								
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)								
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">運転検査結果</td> <td>☒ 良好</td> <td rowspan="3">トシ</td> </tr> <tr> <td>☐ 不良</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>						運転検査結果	☒ 良好	トシ	☐ 不良	
運転検査結果	☒ 良好	トシ								
	☐ 不良									

特記事項