

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

IHIアグリテック
検査番号
01190

お客様 印	名称	LIFE 鎌倉 DENTAL OFFICE	装置番号	13100047	点検実施日	2021.6.17	ご 承 認 印	
	住所	神奈川県鎌倉市御成町4-15 桂ビル	運転時間	2608回	点検実施者	16年4月(48)定期		
	納入場所		サービス担当		電話	044-454-1111		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ動作確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの漏れ・濡れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの動作状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷、濡れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水弁の動作状態・濡れ
- ☒ 給湯弁の動作状態・濡れ
- ☒ RO水弁の動作状態・濡れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 凝結水の取り付け状態・濡れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の動作状態・濡れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環ポンプの動作状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水ポンプの動作状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター遮断防止部の取り付け状態・濡れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基盤のコネクター覆み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾斜内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制動パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる濃度判定(TOSI)

運転確認

⑤・否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は⑤を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアバッキン 上	1
ドアバッキン 下	1
DPIチューブ	2
プレフィルター	1
HEPAフィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030