

# 小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

IHIアグリテック用  
作業者用  
王リタ

|     |      |                      |        |          |         |             |      |    |
|-----|------|----------------------|--------|----------|---------|-------------|------|----|
| お客様 | 名称   | てつお歯科クリニック 様         | 製造番号   | 14060088 | 点検実施日   | 2021. 7. 16 | ご承認印 | 滝沢 |
|     | 住所   | 神奈川県川崎市中原区上小田中6-20-3 | 運転時間   | 4564回    | 点検実施者   | 伊藤 孝一       |      |    |
|     | 納入場所 | 2階                   | サービス形態 |          | モリタ担当部署 |             |      |    |

## ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ動作確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

## 洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・濡れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

## 乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの動作状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

## 配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・濡れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水弁の動作状態・濡れ
- ☒ 給湯弁の動作状態・濡れ
- ☒ RO水弁の動作状態・濡れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・濡れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の動作状態・濡れ

## ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環ポンプの動作状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水ポンプの動作状態・異音

## 洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・濡れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

## 外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
  - ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
  - ☒ キズ・汚れ
  - ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
  - ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
  - ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
  - ☒ 洗剤ポンプチューブ

## 性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 運転確認                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品 (名称・型式) | 数量 |
|--------------|----|
| ドアパッキン 上     | 1  |
| ドアパッキン 下     | 1  |
| DPIチューブ      | 2  |
| プレフィルター      | 1  |
| HEPAフィルター    | 1  |
|              |    |
|              |    |
|              |    |

## 株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030