

点検・修理報告書

管理 No. 210335

発行日: 2021/8/25

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年8月23日			作業時間:	8 Hr
顧客名	くげぬま海岸歯科クリニック 様			TEL:	
所在地	神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2016 年 3 月 31 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100099	運転回数:	1025/3073回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー7 循環水圧低下					
・ドア開閉時の異音					
原因					
・フィルター3の汚れによりフィルターが目詰まりした事が原因と推測します。					
・ドアバネが外装に干渉していたため。					
処置、作業内容					
・保守点検実施					
・ドアバネ、プーリーの位置調整					
特記事項					
・中断ラックのスプレーアーム、ジョイントゴムの劣化の可能性有り。					
・乾燥ヒーターが劣化してきています。次回点検時には交換が必要になります。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		※定期メンテナンスに含む
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 8 月 2 日		
			ご署名 あさの 印		

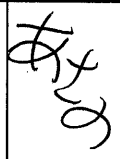
修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/08/25 菊池	サービスG '21/08/25 小山	サービスG '21/08/25 佐藤

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

2021年9月2日

お客様	名称	くげぬま海岸歯科クリニック 様	製造番号	100099	点検実施日	2021年8月23日	承認印 
	住所	神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12	運転回数	1025/3073	点検実施者	株式会社IHI物流産業システム	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン上下	1
薬剤ポンプ内チューブ	2
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

【代替機】点検・修理依頼書

※スライド貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	点検
	修理

貸出先	くげぬま海岸歯科クリニック(神奈川県)	
設置時の運転回数	2	回
回収時の運転回数	81A	回

案件番号	
回収日	2021. 9. 2
回収者	青木、シロノ

機種	ICC
	ICW
	BC-17
	WD-150

機番	100204
----	--------

※記入時お願い※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。
(×)異音がある → (○)本体下部からこすれたような音がある
(×)水漏れがある → (○)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】

- <ICW・WD>
☒ 水
☐ 水&温水

【ラック・バスケット種類】

- <ICW・WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
 有 無
 <SUSフィルター洗浄>
 有 無

【設置場所】

- <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

☒ シンク下

- ☐ 作業台上
☐ その他 ()

【その他特筆事項】

(No. 10 処理中トップ開放 1回のみ)

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 有 ☐ 無