

点検・修理報告書

管理 No. 210061
発行日: 2021年5月31日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021年5月17日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ひのき歯科 様		TEL: 045-298-6998
所在地	神奈川県横浜市西区西平沼町1-12 1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 10 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100363	運転回数: 773回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・フロートスイッチの反応が悪い。		
原因		
・フロートスイッチの配線が接続されているコネクタの制御基板との接続部が少し浮いた状態になっておりました。		
そのため、接触不良によりフロートスイッチの反応が悪い状態になってしまったと考えられます。		
処置、作業内容		
・コネクタの接続部を確実に接続いたしました。		
特記事項		
・真空弁と吸気弁にうなり音がありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	吸気弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 31 日

ご署名

内田 宏城



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/05/31 池	富 '21/05/31 田	山 '21/05/31 本