

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年12月21日

IC Clave		
作業年月日	2021年12月2日	作業時間: 8 Hr
顧客名	三宅歯科医院 様	TEL: 03-3241-2037
所在地	東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル3F	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2021 年 3 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

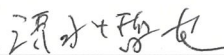
装置情報	製造番号: 300116	運転回数: 968回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エアフィルター交換後に大気圧表示が出るようになった。		
原因		
・圧力センサの指示値にずれがありました。これにより、大気圧表示が出るようになったと考えられます。 エアフィルターの交換は原因ではありません。		
処置、作業内容		
・圧力センサを交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 21 日

ご署名  

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		