

### クラスB オートクレーブ BC-17点検表

西游记

お客様	名前 LIFE 齧食 DENTAL OFFICE	監査番号 13100056	点検実施日 2021.6.17	ご承認印
	住所 神奈川県藤沢市齊成町4-15 棕ビル	運転時間 3:00~6:00	点検責任者 エムシーサービス(株)富澤	
	納入場所	サービス部屋	モリカワ田中	

叶赫(安金)

- ▼ 壓力計の点指示調整

ドア

  - ✓ フック突出スイッチの取り付け状態・作動確認
  - ✓ 閉閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - ✓ フック取付け状態・動作確認
  - ✓ フックパイプ・フック蝶番ビンの取り付け状態
  - ✓ ピス・ナット・ボーローセット等し締め
  - ✓ ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - ✗ フック横出ユニット作動確認
  - ✗ ドアロックユニット作動確認
  - ✓ 重ねのキズ・汚れ
  - ✗ 閉閉ハンドルの操作確認

五

- 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
  - 減節風度センサの汚れ
  - 稲カゴの破損、汚れ
  - 傷内スリーブナーーの損傷・折れ

五

- フジンバルブチューブ・締手の損傷、漏れ
  - シリコンチューブ・締手の損傷、漏れ
  - 純水弁の作動状態、漏れ
  - 接触弁の作動状態、漏れ
  - 超音・吐送弁の作動状態漏れ
  - 減圧弁の作動状態、漏れ(3方弁)
  - ドレン弁の作動状態、漏れ(3方弁)
  - ストレーナーの汚れ
  - 純水・純水タンク水抜きコネクタの漏れ
  - 安全弁(過圧室)の漏れ
  - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
  - ガンプナーの漏れ、液滴割れ
  - 大気圧校和圧力スイッチの作動状態、漏れ
  - ラジエーターの取り付け状態、漏れ

蘇東坡牛記

- ソケット部座換剝れ・漏れ
  - フランジバッキン漏れ
  - ヒーター取り付け状態・漏れ
  - 空気炎防止器・爆発センサ取り付け状態
  - 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
  - 過電弁の作動状態・漏れ

販賣ポンプ

- 水漏れ、異常音の確認
  - 真庭到着
  - 締水タンク
  - 締水タンクの操作・流れ
  - 下部締水弁の流れ
  - 蓋・取っ手の損傷・割れ
  - フロートライバルの作動状況

七言律詩

- ダンクの汚れ・黒れ
  - フロートスイッチの作動状態・汚れ

10

- タンク／ボトルの作動状況・キズ・汚れ
  - ディスプレイの色あせ・表示確認
  - 電源スイッチの作動状態
  - 行程表示LEDの点灯
  - 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
  - 各基板のコネクター種み確認
  - 端子の錆み・コネクターの根絶確認
  - 記録の変色・遺漏有無・結束状態
  - 压力センサーの取付け状態・入力確認
  - ヒーター配線の錆み・変色有無(ハイパー・乾燥)

第 14 页

- 本体の水平確認・基準傾き内  
 アジャスター(フット)の組み・設置状態  
 キズ・汚れ  
 鍵盤パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

角川

- 運転プログラムの確認
  - 入力、出力確認
  - 試運転プログラムの実行・異常動作の有無  
消耗品
  - ドラバッキンの健康・劣化・汚れ
  - エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

  - 日々ロテスト実施
  - ケミカルインジケーターによる判定
  - リーウチック
  - キャリブレーションの実施(風量・圧力)

ページ一覧へ

1

1

本検査の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける

### 改裝部品 (名稱, 型號)

ドアパッキン

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒794-8122 鳴門市鳴門区西太守新町170-6

TEL 089-944-8528 FAX 089-942-8030