

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

電リタ用
作業者内
記号

お客様 様	名称	高木歯科	製造番号	14060086	点検実施日	2021年9月3日	ご承認 印	商 標
	住所	神奈川県小田原市栄町2-8-37長谷川建材ビル	運転回数	4810回	点検実施者	エムシー・ビス(株) 菅間		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点検表示異常
- ドア
- ☒ フック突出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
- ☒ フック取り付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック突出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減圧温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 絶気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(真空発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・磨損割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

真空発生器

- ☒ ソケット油圧接続割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆戻弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下置給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各蓋板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの緩み確認
- ☒ 配線の異色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・異色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制動パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターをつまり・汚れ

性能評価

- ☒ 目&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定 gke
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

⑤ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は⑤を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HIH物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-844-8528

FAX:086-842-9030