


点検・修理報告書

管理 No. 20878

発行日：2021 年 8 月 20 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 7 月 21 日	作業時間：	Hr
顧客名	MAデンタルクリニック 様	TEL：	046-884-8123
所在地	神奈川県横須賀市平成町2-10-2平成町ビル1F	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 4 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100039	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー8 循環水圧低下		
・扉ガラス前面より水漏れ		
原因		
・循環ポンプ破損		
・扉の合わせガラスの接着および固定ナットの緩み		
処置、作業内容		
・循環ポンプと周辺部品交換		
・扉ガラス密閉作業 → ガラス取り外し、コーキングとナットの増し締めから再組立て		
・洗剤端子損傷のため交換しました。 →		
特記事項		

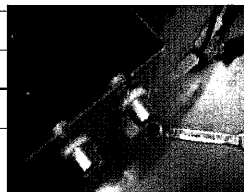

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2	洗剤接続端子（本体側）		1		
3	配管ゴムC		1		
4	排水センサーブロック		1		
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 8 月 30 日

梶谷 夏紀 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスG
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/08/17 菊池	サービスG '21/08/06 廣瀬	安 '21/07/21 田

【代替機】点検・修理依頼書

※スライド貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	点検
	修理

貸出先 MAデジタルリニッパ(神奈川)様

設置時の運転回数 回

回収時の運転回数 285 回

案件番号

回収日 2021. 8. 30

回収者 MC 177222 青木

機番 14060077

機種	ICW
	ICW
	BC-17
	WD-150

※記入時のお願い※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。

(X)異音がある → (O)本体下部からこすれたような音がある

(X)水漏れがある → (O)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】

<ICW・WD>
☒ 水
☐ 水&温水

<ICW・BC>
☐ 生成器
(アイオニー)

【設置場所】
☐ 作業台上
☐ その他 ()
☒ シンク下

【その他特筆事項】

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水ドラグ使用>
 有 無
 <SUSフィルター洗浄>
 有 無

<ICW・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

・エラーなし

(エラーによる停止1回のみ)

【滅菌バッド(ICW・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICW・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無