

点検・修理報告書

管理 No. 210798

発行日: 2021年12月20日

IC Clave	
作業年月日	2021年12月2日 作業時間: 8 Hr
顧客名	武内歯科医院 様 TEL:
所在地	神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100423	運転回数: 1082回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー23 蒸気温度センサー故障が発生した。		
原因 ・ドアパッキンの取り付け方が間違っておりました。 正) 取付枠の内側にはめ込む。 誤) 取付枠の外側のふちにかけるように取り付けていた。		
ドアパッキンの取付状態 (誤) ・これが原因でリークが生じ、缶内の温度、圧力が上がらないので、通常よりも多くの蒸気を蒸気発生器から缶内に注入したために、空焚き状態となり、蒸気温度センサーの温度が上がりすぎたと考えられます。		
処置、作業内容 ・ドアパッキンの伸びも見られたため、新品のドアパッキンを正しく取り付けました。		
特記事項 ・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 22 日
 ご署名 有波 伶果 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福住
'21/12/20	'21/12/20	'21/12/20
池	山	住