

器具除染用洗浄機 IC Washer点検表報告書

お客様用
作業者用
IHインバウ用

お客様 お客様	名称	歯科・矯正歯科 グッドスマイル	製造番号	100068	点検実施日	承認印	
	住所	山梨県甲府市徳行1-4-1	運転回数	1108	点検実施者		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作・異音
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリング及びワイヤの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け
- ☒ ドアヒンジの作動
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放ボタンによるドア開放量(100mm以内)

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサーの配線・コネクタ、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量(50mmL計測)
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの作動・漏れ
- ☒ 循環水圧カススイッチの作動・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり、樹脂部品の摩耗
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動
- ☒ タッチパネルの色あせ・表示・汚れ・損傷
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグの損傷・よれ
- ☒ 各基板のコネクタの緩み
- ☒ 各コネクタの緩み・各端子の抜け
- ☒ 各配線の変色・損傷・結束
- ☒ ヒーター配線の緩み・損傷・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体とドアの位置関係
- ☒ ゲジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン(1年毎)
- ☒ プレフィルタ(2年毎)
- ☒ HEPAフィルタ(2年毎)
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ(1年毎)

性能評価

- ☐ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
IPDチューブ	2
ドアパッキン(上・下)	1
※槽内温度低下！ ⇒ 温度検知時間を延長して1=0	



株式会社IHインバウ

機械事業本部 営業サービス課

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大井 70-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

