

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレープ IC Clave 設置報告書

IHIアグリテック用

お客様	名称	横山デタルクリニック 様	製造番号	100473	ご確認	(株) モリヲ 山本
	住所	山梨県	納入検査実施日	2020.1.10.		
			納入検査実施者			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	☒	ハンドル開閉検出確認	電装系	☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	☒	ドアロックユニット作動確認		☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
	☒	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		☒	電源スイッチの作動状態
	☒	ハンドルキズ・汚れ		☒	SDカードの挿入・取外性
缶体	☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	☒	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	☒	滅菌温度センサの汚れ		☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	☒	棚、トレイのキズ・汚れ		☒	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	☒	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		☒	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	☒	給水タンクの内部汚れ	制御	☒	キズ・汚れ
	☒	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☒	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		☒	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	☒	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		☒	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	☒	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	☒	B&Dテスト実施
	☒	タンク内に汚れはないか		☒	リークチェックテスト
	☒	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		☒	0点調整
	☒	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		☒	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	☒	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	☒	運転・お手入れ方法の説明
				☒	装置内運転時異音

特記事項