

点検・修理報告書

管理 No. 20028
発行日: 2020年6月4日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020年5月29日		作業時間: 16 Hr
顧客名	横山デンタルクリニック 様		TEL:
所在地	山梨県中巨摩郡昭和町築地新居300-2		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 長野営業所		ご担当 様
納入年月日	2020 年 1 月 10 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100473	運転回数: 50回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・タッチパネルの画面表示が二重に表示される。		
原因		
・画面の2重表示は制御基板とタッチパネルの間の通信不良があった場合に発生します。		
・工場にて再現を試みましたが、再現しませんでした。		
・故障原因の可能性のある部品は、タッチパネル、制御基板、ハーネスです。		
処置、作業内容		
・タッチパネルは交換済みですので、まだ交換していない制御基板とハーネスを交換させていただきました。		
特記事項		
・X-カ-保証期間 2021年6月15日まで有効		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	制御基板		1		
2	ハーネス		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6 月 16 日

ご署名 横山 亮也 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 20/06/04 池	富 20/06/04 田	三 20/06/04 宅