

点検・修理報告書

管理 No. 210883

発行日: 2022年1月18日

IC Clave		
作業年月日	2022年1月12日	作業時間: 8 Hr
顧客名	三井歯科医院 様	TEL: 0266-23-8427
所在地	長野県岡谷市郷田1-4-37	ご担当 様
販売店	ササキ(株)松本支店	ご担当 上條 様
納入年月日	2020 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100487	運転回数: 792回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー20 吸気異常が発生した。		
2. 「缶内に圧力が残っています。」が表示される。		
原因		
・圧力センサーに水が浸入し、検知圧力にずれが生じたと考えられます。		
1. 検知圧力がずれたために、運転終了圧力が大気圧に戻らず、エラー20が発生したと考えられます。		
2. 検知圧力がずれたために、待機状態でも圧力が大気圧に戻らず、この表示が出たと考えられます。		
処置、作業内容		
・圧力センサーに水が浸入しない対策を実施いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022年 2月 4日

ご署名

三井 連久



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	中山
22/01/18	22/01/18	22/01/18

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2	年	月	日	【対応日】	2022	年	2	月	4	日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()										
【所在地&ユーザー名】	長野県 三井歯科医院										

案件No. _____

電話受付: _____

電話・現地対応: _____

送り状番号: _____

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100487)

【症状・エラーコード】
 修理品入替作業

【対応方法】

☐ 預かり修理 (代替機No.)

☐ 現地対応

対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: (792) 回 ※前回メンテからの運転回数

保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認

修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認

備考: ()

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD> <ICC・BC>

☐ 水 ☐ 生成器

☐ 水&温水 (アイオニー・)

☒ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD> <ICC・BC>

☐ 標準ラック ☐ トレー棚

☐ ハンドピースラック ☒ 網バスケット

<止水プラグ使用>

☐ 有 ☐ 無

<SUSフィルター洗浄>

☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☒ シンク下

☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】