

保守点検・修理 報告書

管理 No. H2015 40319
発行日 平成27年3月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300016
作業年月日	平成27年3月19日		作業時間: 1 Hr
顧客名	今井クリニック 様		TEL: 0566-26-6700
所在地	愛知県刈谷市一里山町中本山88		担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 25年 3月 13日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 296	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 278	殺菌+アル: 260
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年3月19日

ご署名

鎌田 由美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40ゲランサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	H27 3/19 早坂